



Manipolo piccolo

Manipolo grande



(+39) 0141922135



info@bexteri.it



bexteri.it



Bexteri



## LineSmooth

Dispositivo medico per trattamenti di rimodellamento corpo e tonificazione viso.

- ✓ Adiposità localizzate
  - ✓ Cellulite
  - ✓ Lassità cutanee
  - ✓ Smagliature
  - ✓ Tonificazione
- ✓ Trattamenti anti-aging



## Cos'è LineSmooth?

LineSmooth è un'apparecchiatura innovativa che grazie alla combinazione di quattro tecnologie (radiofrequenza bipolare, luce a infrarossi, aspirazione vacuum e massaggio con rulli meccanici) permette di trattare in modo sicuro, efficace e non invasivo gli inestetismi della cellulite e le adiposità localizzate. Ideale anche per ridurre le circonferenze, rimodellare e tonificare ogni parte del corpo. Grazie al manipolo viso sarà possibile offrire anche trattamenti efficaci di tonificazione viso.

### In che modo LineSmooth aiuta a migliorare l'aspetto della cellulite e a ridurre le circonferenze?

LineSmooth grazie alla combinazione dell'aspirazione vacuum pulsata e ritmica, e al massaggio delicato effettuato dai rulli meccanici, manipola i legami fibrosi e gli strati adiposi responsabili dell'inestetismo e contemporaneamente grazie alla luce a infrarossi e alla radiofrequenza bipolare riscalda il grasso sottocutaneo, aumentando il metabolismo delle cellule adipose. In questo modo i legami fibrosi si distendono e le scorie vengono successivamente eliminate tramite le vie escrettrici. Il risultato finale sarà un aspetto più liscio e compatto, e una riduzione generale delle circonferenze.



## Perchè LineSmooth è più efficace rispetto alle altre apparecchiature?

La vera rivoluzione e unicità di Linesmooth sta nell'utilizzo combinato di quattro fonti di energia nello stesso manipolo:



La **Radiofrequenza bipolare** riscalda il derma in profondità e stimola il metabolismo, ottenendo un effetto lipolitico e stimolando la produzione di nuovo collagene.

La **luce a infrarossi** stimola l'attivazione cellulare aumentando l'apporto d'ossigeno e migliorando l'interscambio cellulare.

La mobilizzazione dei tessuti ottenuta per **aspirazione vacuum** aumenta il flusso sanguigno e linfatico, favorendo l'eliminazione delle tossine e la contrazione della pelle e degli strati sottocutanei.

I **rulli massaggianti** infine concorrono al rimodellamento dei tessuti.

## Come funziona la tonificazione viso?

Grazie al rilascio di calore della radiofrequenza e ai raggi infrarossi che agiscono a livello cellulare, unitamente all'azione aspirante del vacuum che genera un immediato aumento della circolazione sanguigna e del drenaggio linfatico, viene stimolata la formazione di nuovo collagene, migliora l'ossigenazione e il metabolismo cellulare, e aumenta la compattezza e rassodamento del viso. Questo permette di evitare lo svuotamento del tessuto, causa di cute rilassata e "pieghettata".



### Dopo quanti trattamenti si inizierà a vedere un risultato?

Sono stati riportati risultati soddisfacenti e visibili già dopo i primi 3-4 trattamenti. Il ciclo di trattamento completo prevede 8/10 trattamenti con una frequenza di 1 o 2 sedute a settimana. In generale, si nota un graduale miglioramento già dopo la prima seduta: la pelle apparirà più tonica e compatta.



RIDUZIONE/RIMODELLAMENTO  
6 trattamenti



TRATTAMENTO CELLULITE  
4 trattamenti



RIDUZIONE CIRCONFERENZE  
5 trattamenti



TONIFICAZIONE VISO  
4 TRATTAMENTI